



TV 20

eureduc
Créateur de la méthode
Vacuodermie®



APPAREIL DE DÉPRESO-MASSAGE (Vacuodermie®)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Appareil seul	Modèle 220 V	Modèle 110 V
Poids (kg)	5,75 kg	19,5 kg	20,5 kg
Dimensions (LxPxH cm)	37 x 45 x 16	50 x 45 x 105	50 x 45 x 105
Tension (Volts)		220 V	110 V
Fréquence (Hertz)		50 Hz	60 Hz
Sécurité		2 fusibles 5x20 mm 1A	2 fusibles 5x20 mm 2A
Consommation (Watts)		65 W	65 W
Dépression (millibars)		20 à 900 mB	
Intensité sonore (Décibels)		50 dB<I<54 dB	

IEC 60601-1 # H020891-CQPE/1

Mode de régulation de la pression :

↳ Manuel, selon les besoins de chaque protocole de soin

Durées ajustables :

↳ Durée de 20 à 45 minutes, selon les types de séance et la nature de la peau.

Modes d'utilisation :

↳ Vacuodermie® glissée (VdG)

↳ Vacuodermie® stationnaire (VdS)

↳ Vacuodermie® drainante (VdD)

↳ Vacuodermie® à pression constante (VdPC)

Les effets :

↳ Effet drainant (élimination des déchets organiques)

↳ Effet défibrosant (libération - assouplissement de la trame conjonctive – Stimulation des fibres élastiques)

↳ Effet de tonification (stimulation des fibres élastiques)

↳ Effet antalgique (stimulation des mécanorécepteurs)

↳ Effet d'hyper vascularisation (oxygénation et action sur le métabolisme cellulaire)

PRINCIPE ET APPLICATIONS

La Vacuodermie® est un concept innovant de massage permettant de réaliser, à l'aide de différentes têtes d'aspiration et de ventouses transparentes, des traitements allant de la profondeur vers la surface.

Le pli formé par la dépression ou aspiration (modulable en intensité) permet une mobilisation spécifique des plans cutanés sous-jacents. Les manipulations ainsi réalisées, sans pincement et sous contrôle visuel permanent, permettent l'accès à toute une gamme de traitements, jusqu'à lors impossibles à effectuer manuellement.

La technologie du TV20 permet de moduler l'aspiration en forme et en intensité.

On peut ainsi utiliser :

- une dépression constante
- une dépression alternativement basse ou élevée réglable indépendamment. la fréquence dépression basse / élevée est également réglable.

Programmes (96 Esthétiques et Thérapeutiques) et 10 personnalisables

INDICATIONS

- Rhumatologie
- Cicatrices (chirurgie plastique & réparatrice)
- Réflexologie
- Esthétique (corps et visage, cellulite et rides)
- Traumatologie
- Kinésithérapie du sport (tendinoses, séquelles de lésions musculaires)
- Insuffisances veineuses & lymphatiques



CONTRE INDICATIONS

- Erythème
- Dermatose
- Ecchymose
- Tumeur cutanée
- Maladie infectieuse évolutive
- Rhumatisme inflammatoire en période de poussée.

ACCESSOIRE

VM01	Petite/rigide Cicatrices	Ø 6 mm (PVC)	
VM02	Petite / souple Cicatrices et rides	Ø 10 mm (PVC)	
VM03	Petite / rigide Cicatrices et rides	Ø 12 mm (PPMA)	
VM04	Cicatrices Massage réflexe	Ø 17 mm (PPMA)	
VM05	Drainage Massage décontracturant ou relaxant Médecine du sport	Ø 35 mm (PET)	
VM06	Taille medium Médecine du sport Rhumatologie	Ø 60 mm (PET)	
VM07	Grande taille Rhumatologie	Ø 90 mm (PET)	
VE01	Equipée d'un manche Esthétique	Ø 65 mm L: 78 mm (PET)	
VE03	Equipée d'un manche Esthétique	L: 90 mm l: 50 mm (PET)	
VE04	Equipée d'un manche et d'un double rouleau Esthétique	L: 90mm l: 80 mm (PET)	
VM11	Tube d'aspiration «Y» pour multi-applications	L: 1100 mm 4/8 mm (PVC)	
PN33D	Kit complet 11 accessoires Têtes d'aspiration + Tube d'aspiration «Y» + filtres	-	
PU01	Pupitre TV20	50 x P 45 x H 105 cm	
PU03	Accessoire support flexible pour TV10 et TV20	H: 60 cm	
PU05	Guéridon standard sans tiroir	69 x P 41 x H 79 cm	
PU06	Guéridon standard avec tiroir	69 x P 41 x H 79 cm	